

Heartworm antigén - Anaplasma - Borrelia Burgdorferi - Ehrlichia protilátky

Testovacia súprava na detekciu antigénu a protilátok

truRapid FOUR

len na veterinárne použitie

PRINCÍP TESTU

TruRapid FOUR test je rýchly test na detekciu antigénu srdcových červov; protilátky *Borrelia burgdorferi*; *Anaplasma phagocytophilum* a *platys*; *Ehrlichia canis*, *chaffeensis*, a *ewingii* v psom sére, plazme, príp. antikoagulovanej plnej krvi.

OBSAH SÚPRAVY

- Testovacia doštička (10 alebo 25)
- Pipety (10 alebo 30)
- Tlmivý roztok (1-2 x 5 ml)- modrý vrchnák
- Návod na použitie

SKLADOVANIE

- Súprava by mala byť skladovaná pri teplote 2-30°C.
- Zabráňte zamrznutiu.
- Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.

UPOZORNENIA

- Len na veterinárne použitie.
- Pre každú testovanú vzorku použite novú testovaciu doštičku a pipetu.
- Použite iba pipetu dodanú so súpravou.
- Nepoužívajte po dátume expirácie súpravy.

VZORKY

- Použiteľné typy vzoriek sú psie sérum, plazma a antikoagulovaná (EDTA alebo heparín) plná krv.
- Vzorky musia mať izbovú teplotu a musia byť jemne premiešané pred testovaním.
- Vzorky by mali byť testované čerstvé alebo uchovávané v chladničke pri teplote 2-8°C do jedného týždňa.
- Pri dlhšom skladovaní je možné uchovávať vzorky séra alebo plazmy pri -20°C. Zmrazené vzorky by sa mali pred použitím odstrediť.
- Vyhnite sa silne hemolyzovaným alebo kontaminovaným vzorkám. Lipemické vzorky neovplyvnia výsledky testu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Súpravu a všetky vzorky, ktoré budú testované, preneste do izbovej teploty približne 30 minút pred testovaním.
- Vyberte testovaciu doštičku z ochranného vrečka a položte ju vodorovne na rovnom povrchu.
- Pomocou dodanej pipety nakvapkajte vertikálne 1 kvapku vzorky do jamky na vzorku bez dotyku pipety testovacej doštičky. Nechajte vzorku absorbovať.

x 1 (do každej jamky)

Pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku vertikálne do jamky na vzorku.

X 2 (do každej jamky)

Výsledky odčítajte po 10 minútach.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

• Test je pozitívny, ak sú ružové/fialové testovacie čiary akejkoľvek intenzity prítomné pri Heartworm (H), Lyme (L), Anaplasma (A) a/alebo Ehrlichia (E) značkách a kontrolných líniách (C).

• Test je negatívny, ak je prítomná len kontrolná čiara.

• Test je neplatný, ak sa na kontrolnej línii neobjaví žiadna čiara, aj keď na testovacej línii je prítomná čiara.

• Všetky výsledky by sa mali interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických a diagnostických informácií.

Kľúč symbolov

Spotrebujte do dátumu

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalógové číslo

Obmedzenie teploty

Pozrite si návod na použitie

Výrobca

Dostatočné pre <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | www.heska.com

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com