

Virus imunodeficiency koček protilátky

Testovací sada pro detekci protilátek

truRapid FIV

jen pro veterinární použití

PRINCIP TESTU

TruRapid FIV test je rychlý test k detekci protilátek na kočičí virus imunodeficiency v séru, plazmě nebo antikoagulované plné krvi.

OBSAH SOUPRAVY

- Testovací destička (10 anebo 25)
- Pipeta (10 anebo 30)
- Tlumivý roztok (7 ml)- bílý uzávěr
- Návod k použití

SKLADOVÁNÍ

- Souprava by měla být skladována při teplotě 2-30°C.
- Zabraňte zamrznutí.
- Vyhněte se skladování na přímém slunci.

UPOZORNĚNÍ

- Jen pro veterinární použití.
- Pro každý testovaný vzorek použijte novou testovací destičku a pipetu.
- Použijte pouze pipetu dodanou se sadou.
- Nepoužívejte po datu expirace soupravy.

VZORKY

- Použitelnými typy vzorků jsou kočičí sérum, plazma a antikoagulovaná (EDTA nebo heparin) plná krev.
- Vzorky musí mít pokojovou teplotu a musí být jemně promíchány před testováním.
- Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo uchovávány v chladničce při teplotě 2-8°C do jednoho týdne.
- Při delším skladování lze uchovávat vzorky séra nebo plazmy při -20°C. Zmrazené vzorky by se měly před použitím odstředit.
- Vyhněte se silně hemolyzovaným nebo kontaminovaným vzorkům. Lipemické vzorky neovlivní výsledky testu.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, přeneste do pokojové teploty přibližně 30 minut před testováním.
- Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovném povrchu.
- Pomocí dodané pipety nakapejte vertikálně 1 kapku vzorku do jamky na vzorek bez dotyku pipety testovací destičky. Nechte vzorek absorbovat.

Přidejte 2 kapky tlumivého roztoku vertikálně do jamky na vzorek.

Výsledky odečtěte po 10 minutách.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

- Test je pozitivní, jsou-li na stejném testovacím proužku přítomny dvě čáry (kontrolní čára a testovací čára) (pozitivní protilátky FIV).

- Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.
- Test je neplatný, pokud se na kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.
- Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

Klíč symbolů

Spotřebujte do data

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Omezení teploty

Viz návod k použití

Výrobce

Dostatečné pro <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | www.heska.com

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com