

Giardia

Testovací sada pro detekci antigenu

truRapid Giardia

jen pro veterinární použití

PRINCIP TESTU

TruRapid Giardia test je rychlý test k detekci antigenu na cysty giardií ve fekáliích psů a koček.

OBSAH SOUPRAVY

- Testovací destička (5)
- Vatový tampon (5)
- Tlumivý roztok na extrakci vzorku (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý uzávěr
- Návod k použití

SKLADOVÁNÍ

- Souprava by měla být skladována při teplotě 2-30°C.
- Zabraňte zamrznutí.
- Vyhněte se skladování na přímém slunci.

UPOZORNĚNÍ

- Jen pro veterinární použití.
- Pro každý testovaný vzorek použijte nový tampon a testovací destičku.
- Nepoužívejte po datu expirace soupravy.
- V extrakčním tlumivém roztoku mohou vznikat sraženiny, které ale výsledky testu nikterak neovlivní.

VZORKY

- Použitelnými typy vzorků jsou psí a kočičí fekálie.
- Vzorky musí mít pokojovou teplotu.
- Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo uchovávány v chladničce při teplotě 2-8°C do jednoho týdne.
- Při delším skladování lze uchovávat vzorky při -20°C.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, přeneste do pokojové teploty přibližně 30 minut před testováním.
2. Odšroubujte uzávěr z tlumivého roztoku pro extrakci vzorků.
3. Pokryjte dodaný tampon tenkou vrstvou fekálního materiálu. Pokuste se nasytit tampon tekutinou, je-li přítomna.
4. Ponořte tampon se vzorkem do tlumivého roztoku k extrakci vzorku a zakružte tamponem v tlumivém roztoku.
5. Odlomte přebytečnou část tamponu o ústí nádoby a vatový tampon nechte uvnitř. Zbytek tamponu zlikvidujte.
6. Nasadte uzávěr na nádobku a odlomte hrot.

7. Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovný povrch.

8. Držte extrakční nádobku ve svislé poloze, naneste tři kapky do jamky na vzorek v destičce a počkejte 10 minut.

X 3

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

- Test je pozitivní, jsou-li přítomny dvě čáry (kontrolní čára a testovací čára).
- Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.
- Test je neplatný, pokud se na kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.
- Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

Klíč symbolů

Spotřebujte do data

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Omezení teploty

Viz návod k použití

Výrobce

Dostatečné pro <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | www.heska.com

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com