

Psí Parvovírus a Giardia

Testovacia súprava na detekciu antigénu

truRapid Parvovirus Giardia

len na veterinárne použitie

PRINCÍP TESTU

TruRapid Parvo/Giardia test je rýchly test na detekciu antigénu *psieho parvovírusu a cýst giardií* v psej stolici.

OBSAH SÚPRAVY

- Testovacia doštička (5)
- Vatový tampón (5)
- Extrakčný tlmivý roztok (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý vrchnák
- Návod na použitie

SKLADOVANIE

- Súprava by mala byť skladovaná pri teplote 2-30°C.
- Zabráňte zamrznutiu.
- Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.

UPOZORNENIA

- Len na veterinárne použitie.
- Pre každú testovanú vzorku použite nový vatový tampón a testovaciu doštičku.
- Nepoužívajte po dátume expirácie súpravy.
- V extrakčnom tlmivom roztoku sa môžu tvoriť zrazeniny, ktoré ale výsledky testu neovplyvnia.

VZORKY

- Použiteľné typy vzoriek sú psie výkaly.
- Vzorky musia mať izbovú teplotu.
- Vzorky by mali byť testované čerstvé alebo uchovávané v chladničke pri teplote 2-8°C max do jedného týždňa.
- Pre dlhšie skladovanie môžu byť vzorky skladované pri -20°C

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Súpravu a všetky vzorky, ktoré budú testované, preneste do izbovej teploty približne 30 minút pred testovaním.
2. Odskrutkujte uzáver z tlmivého roztoku na extrakciu vzoriek.
3. Pokryte dodaný tampón tenkou vrstvou fekálneho materiálu. Pokúste sa nasýtiť tampón tekutinou, ak je prítomná.
4. Ponorte tampón so vzorkou do tlmivého roztoku na extrakciu vzorky a zakrúžte tampónom v tlmivom roztoku.

5. Zalomte prevyšujúcu časť tampónu o ústie nádobky a vatový tampón nechajte vo vnútri. Zvyšok tampónu zlikvidujte.
6. Nasadte uzáver na nádobku a odlomte hrot.
7. Vyberte testovaciu doštičku z ochranného vrečka a položte ju vodorovne na rovný povrch.
8. Držte extrakčnú nádobku vo zvislej polohe, naneste tri kvapky do jamky na vzorku v doštičke a počkajte 10 minút.

X 3 (do každej jamky)

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

- Test je pozitívny, ak sú prítomné dve čiary (kontrolná čiara a testovacia čiara) na tom istom stripe testu (parvovírus antigén alebo giardia antigén).
- Test je negatívny, ak je prítomná len kontrolná čiara.

CPV Pozitívny
Giardia Negatívny
Oba pozitívne
Oba negatívne

- Test je neplatný, ak sa v mieste kontrolnej línie neobjaví žiadna čiara, aj keď na testovacej línii je prítomná čiara.
- Všetky výsledky by sa mali interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických a diagnostických informácií.

Kľúč symbolov

Spotrebujte do dátumu
Kód šarže (šarže)
Sériové číslo
Katalógové číslo

Obmedzenie teploty
Pozrite si návod na použitie
Výrobca
Postačujúce pre <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA
US: 800.464.3752 | www.heska.com
INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com